

GETINGE
GETINGE GROUP

GETINGE WD15 CLARO
EFFIZIENZ UND DURCHBLICK VEREINT



Always with you



GETINGE

DER EINBLICK MACHT DEN UNTERSCHIED

Bei der Entwicklung neuer Produkte greifen wir auf unseren umfassenden Einblick in den Arbeitsalltag unserer Kunden zurück. Dieser erfolgreiche Ansatz hat uns zum Marktführer im Bereich der Reinigung, Desinfektion und Sterilisation gemacht.

Unser Ziel bei der Konzeption des Getinge WD15 Claro war die Entwicklung eines optimalen Untertisch-Reinigungs- und Desinfektionsgerätes für Stationen, Kliniken und Zahnarztpraxen. Dabei wollten wir eine bestmögliche Effizienz, Ergonomie und Anwenderfreundlichkeit bieten.

Das Ergebnis: ein leistungsstarkes, schnelles und – mit Verlaub gesagt – optisch sehr ansprechendes Gerät namens Claro.

Dieser Spitzname leitet sich von seiner wohl größten Besonderheit ab, die noch einmal eine andere Art von „Einblick“ gewährt: Dank Glasfenster und LED-Leuchten haben Sie freie Sicht auf alles, was während des Prozesses im Inneren geschieht.

ANFORDERUNGSGERECHTE KAPAZITÄT

Als kompaktes Untertischgerät eignet sich der Claro ideal für Gesundheitseinrichtungen, die Platz sparen möchten. Selbstverständlich lässt er sich problemlos mit den Tisch-Sterilisatoren und Durchlaufsiegelgeräten von Getinge kombinieren. Auch hier ist ein umfassendes Angebot an praktischem Zubehör verfügbar.



Fasst 6 DIN-Siebe

Dank der durchdachten Positionierung der Wasser- und Luftanschlüsse fasst die Kammer auf jeder Ebene zwei DIN-Siebe.



Im Handumdrehen Platz für größere Produkte

Entfernen Sie einfach den oberen Wagen. Da die Anschlüsse am oberen Sprüharm selbstschließend sind, müssen keine zusätzlichen Abdeckplatten montiert werden. Die Sprüharme lassen sich durch einen einfachen Handgriff an beiden Enden öffnen und erleichtern die Wartung des Claro.





Für eine ergonomischere Arbeitshöhe ist der Claro auch mit einem Schrank aus Edelstahl verfügbar. In diesem können dann Reinigungsmittel und andere Verbrauchsmaterialien bequem verstaut werden.

VIP (View-In-Process) Glasfenster

Für zusätzliche Sicherheit haben Sie dank Glasfenster und Beleuchtung stets freie Sicht auf den Prozess. So sehen Sie auf einen Blick, ob sich die Sprüharme ordnungsgemäß drehen und die Produkte richtig gereinigt werden.

Integrierte Heißlufttrocknung

Auf die Spül-, Reinigungs- und Desinfektionsphasen folgt eine zusätzliche integrierte Trocknungsphase mit HEPA Filter 13, in der die Produkte schnell und effizient getrocknet werden.

Drucküberwachung der Pumpe

Weitere Sicherheit bietet der Drucksensor der Umwälzpumpe. Er stoppt den Prozess und erzeugt einen Fehlercode, wenn der Wasserdruck nicht korrekt ist.

Leicht zu bedienen

Das Steuerungssystem PACS 350 ist absolut benutzerfreundlich, und die Programmeinstellungen lassen sich über das Bedienfeld problemlos ändern.

Dokumentation über Drucker oder NetCom

Ein Drucker oder eine NetCom-Lösung mit USB-Anschluss für detaillierte Prozessberichte sind optional verfügbar. Außerdem lässt sich der Claro über NetCom an T-DOC, das umfassende Instrumentenmanagement-System von Geringe, anschließen.

Übersichtliches Display

Das Gerät verfügt über eine Selbstdiagnosefunktion. Programm, Phase, Kammertemperatur, Fehlercodes und die verbleibende Zeit werden auf dem Display angezeigt. So kann jeder Schritt des Prozesses verfolgt werden. Somit wird die Handhabung vereinfacht.

Wrasenkondensator

Dank einer cleveren Lösung mit Kondensatkühlung ist kein Anschluss an ein Abluftsystem erforderlich. So gelangt weniger Feuchtigkeit in den Raum, und die Installation wird vereinfacht.

ZUBEHÖR FÜR JEDEN BEDARF

Getinge bietet ein gut abgestimmtes Zubehörsortiment und Lösungen für die Wiederaufbereitung von Produkten jeder Art.



UNTERER BASISWAGEN

Mit Halter für größere Güter.

Kapazität:

2 SPRI II (340 × 250 × 70 mm) oder
2 DIN 1/1 (480 × 250 × 50)

Freie Beladehöhe:

320 mm inkl. oberem Reinigungswagen

490 mm ohne oberen Reinigungswagen

Grundfläche: 520 × 496 mm

Art.-Nr. 503014600



OBERER BASISWAGEN

Kapazität:

2 SPRI II (340 × 250 × 70 mm) oder
2 DIN 1/1 (480 × 250 × 50)

Freie Beladehöhe: 100 mm

Art.-Nr. 503013400



MIC-RAMPE

Zum Einsatz im unteren Basiswagen.

Ausgestattet mit einer Halterung für 4 Kanülen, 3 Injektorrohre (Ø 4 mm), 2 Silikonschläuche (Ø 8 mm) mit 2 männlichen Luer-Locks, 2 Injektorrohre (Ø 15 mm) und 2 Injektorrohre (Ø 20 mm).

Art.-Nr. 503155500



AN-RAMPE

Zum Einsatz im unteren Basiswagen. Ausgestattet mit

1 Sprührohr für Atembeutel,

1 Sprührohr für Balg,

1 Sprührohr für Schlauchanschlüsse und

2 Injektorrohre für 1 Larynxmaske mit

zwei Anschlüssen und 3 Anschlüssen für

Schläuche mit einem Innendurchmesser

von 8 bis 30 mm und einer maximalen

Länge von 1.500 mm. Eine Halterung für

Schläuche ist ebenfalls verfügbar.

Art.-Nr. 503301900



STÄNDER FÜR SCHALEN, 151 MM

Kapazität: 12 B8 (Ø 160 × 80 mm)

Abmessungen: 494 × 317 × 40 mm

Art.-Nr. 498859700



STÄNDER FÜR SCHALEN, 111 MM

Kapazität: 12 B6 (Ø 125 × 55 mm)

Abmessungen: 494 × 317 × 40 mm

Art.-Nr. 498859600



GESTELL FÜR BABY- FLASCHEN

Kapazität: 36 Flaschen

Für Babyflaschen mit einer

Öffnung von mehr als Ø 20 mm

Art.-Nr. 477071900



GESTELL FÜR BABY- FLASCHEN

Kapazität: 24 Flaschen

Für Babyflaschen mit einer

Öffnung von mehr als Ø 20 mm

Art.-Nr. 476942300

IN ZWEI FARBEN EHRHÄTLICH

Der Claro ist in blau oder weiß im Edelstahlrahmen verfügbar. Für eine ergonomischere Arbeitshöhe können beide Varianten mit einem 55 cm hohen Unterschrank geliefert werden.



TECHNISCHE DATEN

Design	Blau oder weiß
Abmessungen außen	600 x 620 x 850 mm (H x W x D)
Abmessungen innen	536 x 536 x 520 (H x W x D)
Gewicht	92 kg
Fassungsvermögen	150 l
Material Kammer/Verkleidung	AISI 316L/AISI 304L
Kommunikationsanschluss	RS232 und RS485
Elektrische Anschlüsse	Ein- oder dreiphasig 50/60 Hz 200 V, 208 V, 220-230 V, 240 V oder 400 V
Heizelement	Wasser 6,3 kW; Trockner 2,8 kW
Wasseranschluss	Kalt und warm
Dosierpumpen	2
Dosiermittelkontrolle	Ja (Standard)
Umwälzpumpe	380 l/min
Geräuschpegel	< 60 dBA
Normen und Richtlinien	EN ISO 15883, MDD, ELT/SEMKO, EMC
Optional	Unterschrank 2 zusätzliche Dosierpumpen mit Dosiermittelkontrolle Wasserenthärter Externer Drucker NetCom-Bluebox T-DOC (Instrumentenmanagementsystem)



UMFASSENDE LÖSUNGEN ZUR INFEKTIONSKONTROLLE

Getinge ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für effektive Reinigung, Desinfektion und Sterilisation im Gesundheitswesen und auf dem Gebiet der Life Sciences. Wir sind darauf spezialisiert, unseren Kunden besseren Nutzen zu geringeren Kosten zu bieten. Dies erreichen wir, indem wir gut durchdachte und maßgeschneiderte Lösungen liefern. Wir begleiten unsere Kunden während des gesamten Ablaufs – von der Planung über die Aus- und Weiterbildung und Dokumentation bis hin zum Support – und bieten umfassende Lösungen, langfristiges Engagement und globale Präsenz. Getinge – Always with you

GETINGE Vertrieb und Service GmbH

Kehler Strasse 31, D-76437 Rastatt
Phone: +49 7222 / 932-306
Fax: +49 7222 / 932-597
info.inco-de@getinge.com

GETINGE Odelga Vertrieb und Service GmbH

Feldkirchnerstrasse 105, AT-8055 Graz
Phone: +43 316 / 58 25 47
Fax: +43 316 / 58 49 38
info-austria@getinge.com

Getinge ALFA AG

Quellenstrasse 41b, CH-4310 Rheinfelden
Phone: +41 61 836 47 70
Fax: +41 61 836 47 71
info@getinge.ch

GETINGE

GETINGE GROUP

www.getinge.com

Die GETINGE GROUP zählt weltweit zu den führenden Anbietern im Bereich der Gesundheitsversorgung. Die medizintechnischen Produkte und Lösungen der Unternehmensgruppe tragen entscheidend zur Qualitätssteigerung und Kostensenkung im Gesundheitswesen bei und werden unter den Marken ArjoHuntleigh, GETINGE und MAQUET angeboten. **ArjoHuntleigh** konzentriert sich auf Lösungen für die Patientenmobilität und die Wundversorgung. **GETINGE** bietet im Gesundheitswesen Lösungen für die Infektionskontrolle an und in den Forschungseinrichtungen für die Kontaminationsvorbeugung. **MAQUET** ist auf Lösungen, Therapien und Produkte für chirurgische Eingriffe und die Intensivpflege spezialisiert.