

**GETINGE WD14 TABLO
EFFIZIENTES REINIGUNGS- UND
DESINFEKTIONSGERÄT ALS TISCHMODELL**



ZEIT IST GELD

Kleine Stationen und Kliniken haben hohe Anforderungen, wenn es darum geht, den Instrumentenkreislauf zu beschleunigen. Und selbstverständlich soll dies auf absolut zuverlässige, sichere und kosteneffiziente Weise geschehen.

Wir haben die perfekte Lösung: Getinge WD14 Tablo – die neue Generation der Tischgeräte für Reinigung und Desinfektion.



Getinge kann auf mehr als 100 Jahre Erfahrung in Infektionskontrolle und Kontaminationsprävention zurückblicken. Wir ziehen diese Erfahrung aus Installationen in verschiedensten Bereichen, von Sterilisationszentren und großen Krankenhäusern bis hin zu kleinen Gesundheitszentren und Privatpraxen. Dieses umfassende Fachwissen setzen wir bei der Entwicklung von jedem neuen Produkt ein.

Dabei konzentrieren wir uns auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Wir möchten Sie dabei unterstützen, Ihr Versorgungsangebot zu optimieren, Kosten zu senken, Belastungen zu reduzieren, die Hygiene sicherzustellen und die Lebensqualität Ihrer Patienten zu verbessern.





HÖCHSTLEISTUNG IM KOMPAKTFORMAT

Effizientes Reinigungs- und Desinfektionsgerät in Tischausführung, mit verschiedenen Reinigungsfunktionen, entspricht allen Normen und Richtlinien.

KOMPAKT

Dank der kompakten Größe von 500 × 557 × 627 mm (B x H x T) sind Bereitstellung, Betrieb und Wartung des Tablo ganz einfach. Gleichzeitig verfügt das Gerät über eine einzigartige Kammerkonstruktion mit großer Ladekapazität und lange Sprüharme (450 mm) für hervorragende Ergebnisse.

Wenn Sie das Reinigungs- und Desinfektionsgerät auf einer Standard-Arbeitsfläche platzieren, erhalten Sie eine ergonomischere Arbeitshöhe.

SCHNELL

Die Prozessgeschwindigkeit kann einen entscheidenden Einfluss auf Ihre Gesamtbetriebskosten haben, da die Verfügbarkeit der Instrumente von ihr abhängt – und damit die Gesamtzahl der in Ihrer Einrichtung benötigten Instrumente. Mit dem Tablo lässt sich die Prozessdauer mit Warmwasseranschluss und Dreiphasenstrom auf 40 Minuten reduzieren. Durch ein integriertes Lüftungssystem wird Restfeuchtigkeit entfernt, um die Instrumente zu trocknen. Nach 5 Minuten kann die Trocknungsphase bei Bedarf unterbrochen werden.

Gleichzeitig werden Wasser- und Energieverbrauch gesenkt und so die Kosteneffizienz weiter erhöht. Und auch die Installation erfolgt im Handumdrehen.

ZUVERLÄSSIG

Der Tablo ist ein vollautomatisches Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit unabhängiger Temperaturüberwachung zur Sicherstellung, dass die Wassertemperatur von den voreingestellten Werten nicht abweicht.

Für zusätzliche Sicherheit wird das Öffnen der Tür während des laufenden Prozesses durch ein elektrisches Schließsystem verhindert. Ein Kontrollsystem zur Fehlerbehebung ist ebenfalls integriert.

Sie müssen nur das Gerät beladen, das Programm auswählen und starten.

AUSGIEBIG GETESTET

Getinge Geräte und Reinigungsmittel wurden entwickelt, getestet und geprüft, sodass die Getinge Reinigungsgeräte die Normen EN ISO 15883 über die Reinigungseffizienz von Gütern erfüllen, die gewöhnlich in ZVSA, Kliniken und Praktiken zu finden sind, um Anwender und Patienten zu schützen.



OPTIONEN



DOSIERPUMPEN

Der Tablo ist als Option mit zwei Dosierpumpen mit Dosiermittelkontrolle für Reinigungs- und Klarspülmittel ausgestattet. Zwei zusätzliche Dosierpumpen ermöglichen den Einsatz von enzymatischem Reiniger und Neutralisationsmitteln.



DRUCKER

Über den Drucker wird ein ausführlicher Bericht mit allen Informationen zum abgeschlossenen Prozess ausgegeben.



NETCOM

Der Tablo verfügt über einen RS232-Anschluss zur Kommunikation mit anderen Geräten. Verwenden Sie NetCom zur Prozessdokumentation über USB, oder schließen Sie den Tablo an das Instrumentenmanagementsystem T-DOC von Getinge an.

UMFANGREICHES ZUBEHÖR

Getinge bietet ein vollständiges Zubehörprogramm, das speziell für eine effiziente Reinigung entwickelt wurde.



BASISWAGEN mit BLINDANSCHLUSS

Der Blindanschluss ist standardmäßig vorhanden. Bei Auswahl von MIC- oder Luer-Rampe wird der Wagen ohne Blindanschluss geliefert.



INSTRUMENTENSET

Mit 1 Befestigungssystem für Instrumente
1 SPRI II-Instrumentenablage und
3 Silikonschläuche (ø 6 mm). Jeder Silikonschlauch ist mit einem männlichen Luer-Lock und einem Anschlussstutzen ausgestattet.
Art.-Nr.: 502999800



MIC-RAMPE

Ausgestattet mit einer Halterung für 4 Kanülen, 3 Silikonschläuche (ø 8 mm) mit 3 männlichen und 3 weiblichen Luer-Locks, 1 Injektorkörper (ø 15 mm), 1 Injektor (ø 20 mm), 2 Injektorrohren und 2 Anschlüssen für optionale Injektoren. Feinfilter inklusive.
Art.-Nr.: 502648700



LUER-RAMPE

Ausgestattet mit 9 männlichen Luer-Locks, 2 Anschlüssen für optionale Injektoren, 2 Silikonschläuche mit je 1 weiblichen und 1 männlichen Luer-Lock. Feinfilter inklusive.
Art.-Nr.: 502951800



IN ZWEI FARBEN ERHÄTLICH

Die WD14 Tablo von Getinge ist in zwei Farben erhältlich, in blau oder weiß im Edelstahlrahmen.



Getinge WD14 Tablo

Abmessungen außen	500x527x657 mm (BxHxT)
Abmessungen innen	435x300x460 mm (BxHxT)
Gewicht	35 kg
Fassungsvermögen	63 l
Material Kammer und Innentür	AISI 316L
Material Außentür	Polymermaterial (ABS)
Material Verkleidung	AISI 304L
Kommunikationsanschlüsse	RS232 und RS485
Elektrische Anschlüsse	Ein- oder dreiphasig 50/60 Hz 200V, 208V, 230V oder 400V
Heizelement	3,6 kW oder 1,8 kW
Wasseranschluss	Kalt oder kalt/warm
Dosierpumpen	2
Umwälzpumpe	115 l/min
Geräuschpegel	< 60 dB (A)
Normen und Richtlinien	EN ISO 15883, MDD, SEMCO, EN IEC 61010-1, EN 61000-3-2
Optional	2 zusätzliche Dosierpumpen mit Dosiermittelkontrolle Externer Drucker NetCom



UMFASSENDE LÖSUNGEN ZUR INFEKTIONSKONTROLLE

Getinge ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für effektive Reinigung, Desinfektion und Sterilisation im Gesundheitswesen und auf dem Gebiet der Life Sciences. Wir sind darauf spezialisiert, unseren Kunden besseren Nutzen zu geringeren Kosten zu bieten. Dies erreichen wir, indem wir gut durchdachte und maßgeschneiderte Lösungen liefern. Wir begleiten unsere Kunden während des gesamten Ablaufs – von der Planung über die Aus- und Weiterbildung und Dokumentation bis hin zum Support – und bieten umfassende Lösungen, langfristiges Engagement und globale Präsenz. Getinge – Always with you

GETINGE Vertrieb und Service GmbH

Kehler Strasse 31, D-76437 Rastatt
Phone: +49 7222 / 932-306
Fax: +49 7222 / 932-597
info.inco-de@getinge.com

Getinge Odelga Vertrieb und Service GmbH

Perfektastrasse 87, A-1230 Wien
Phone: +43 1 8958080
Fax: +43 1 8958080-99
office@getinge.at

Getinge Schweiz AG

Quellenstrasse 41b, CH-4310 Rheinfelden
Phone: +41 61 836 47 70
Fax: +41 61 836 47 71
info@getinge.ch

GETINGE

GETINGE GROUP

www.getinge.com

Die GETINGE GROUP zählt weltweit zu den führenden Anbietern im Bereich der Gesundheitsversorgung. Die medizintechnischen Produkte und Lösungen der Unternehmensgruppe tragen entscheidend zur Qualitätssteigerung und Kostensenkung im Gesundheitswesen bei und werden unter den Marken ArjoHuntleigh, GETINGE und MAQUET angeboten. **ArjoHuntleigh** konzentriert sich auf Lösungen für die Patientenmobilität und die Wundversorgung. **GETINGE** bietet im Gesundheitswesen Lösungen für die Infektionskontrolle an und in den Forschungseinrichtungen für die Kontaminationsvorbeugung. **MAQUET** ist auf Lösungen, Therapien und Produkte für chirurgische Eingriffe und die Intensivpflege spezialisiert.